

# activ

## meineLinse activ Hard Reiniger

Die vorliegende Packungsbeilage enthält wichtige Informationen. Bitte lesen Sie sich die Packungsbeilage aufmerksam durch und heben Sie sie zum späteren Nachlesen auf.

### Speziell für die Reinigung formstabiler gasdurchlässiger Kontaktlinsen aus Fluorsiliconacrylat und Siliconacrylat abgestimmt.

Der tägliche Gebrauch von meineLinse activ Hard Reiniger verhindert die Bildung hartnäckiger Ablagerungen, die den Tragekomfort von formstabilen gasdurchlässigen Kontaktlinsen beeinträchtigen.

• Speziell für die Verwendung mit meineLinse activ Hard Reiniger Aufbewahrungslösung abgestimmt.

**Inhaltsstoffe:** Wirkstoff: Alkylsulfatbasiertes Tensid (8,0 %) Weitere Inhaltsstoffe: Natriumchlorid, Natriumphosphat, alkoholbasierte nichtionische Tenside, Silicagel-Suspension, Titandioxid.

### ANLEITUNG: ⚠

1. Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie die Kontaktlinsen anfassen.
2. Reiben Sie in Ihrem Handteller jede Kontaktlinse sanft beidseitig mit 6-8 Tropfen meineLinse activ Hard Reiniger zwanzig (20) Sekunden lang.
3. ENTFERNEN SIE ANSCHLIEßEND DEN REINIGER DURCH AUSGIEBIGES ABSPÜLEN RÜCKSTANDSFREI VON DER LINSENOBERFLÄCHE, WIE ES IHNEN IHR KONTAKTLINSENSPEZIALIST ERKLÄRT HAT.
4. Kontaktlinsen in den Behälter zur Aufbewahrung legen und mit frischer Aufbewahrungslösung bedecken. Lösung mindestens vier Stunden lang (oder auch über Nacht) einwirken lassen. BEI VERSEHENTLICHEM AUGENKONTAKT MIT DEM REINIGER KONTAKTLINSEN ENTFERNEN UND DAS AUGE UNVERZÜGLICH MIT FLIEßENDEM LEITUNGSWASSER SPÜLEN, BIS ALLE RÜCKSTÄNDE AUS DEM AUGE ENTFERNT SIND. WENN SIE DANACH EINE REIZUNG IM AUGE VERSPÜREN, ÜBERMÄßIGEN TRÄNENFLUSS, SICHTBEEINTRÄCHTIGUNGEN ODER EINE RÖTUNG DES AUGES FESTSTELLEN, WENDEN SIE SICH UNVERZÜGLICH AN IHREN AUGENARZT.

### Vorsichtsmaßnahmen:

- Gebrauchte Lösung niemals wiederverwenden.
- KONTAKTLINSEN STETS MIT AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG BEDECKT HALTEN. KONTAKTLINSEN NIEMALS IN DEN REINIGER EINLEGEN. NACH ERFOLGTER REINIGUNG KONTAKTLINSEN VOR DEM EINLEGEN IN DIE PFLEGE-LÖSUNG STETS SORGFÄLTIG ABSPÜLEN, WIE ES IHNEN IHR KONTAKTLINSENSPEZIALIST ERKLÄRT HAT.
- Tropfspitze der Flasche weder berühren noch mit Gegenständen in Kontakt bringen, da hierbei die Lösung verunreinigt werden kann.
- Flasche stets fest verschlossen halten.
- Vor jedem Anfasen der Kontaktlinsen Hände waschen und sorgfältig abspülen.
- Lösung nach dem auf dem Behälter angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

### Warnhinweise:

#### LÖSUNG NICHT DIREKT AUF DAS AUGE BRINGEN

Von Kindern fernhalten.  
Verfalldatum beachten.  
Nicht verwenden, wenn das Siegelband an der Flasche beschädigt ist oder fehlt.  
Lösung nicht verwenden, wenn Sie gegen einen Bestandteil des Produkts allergisch sind.  
Drei Monate nach dem Anbrechen der Flasche verbliebene Lösung wegschütten.  
NICHT ZUR PFLEGE WEICHER KONTAKTLINSEN GEEIGNET.

**Ausgabedatum:** 2019-05




CE 0050

STERILE A

Vertrieb durch: Opticland GmbH,  
D-90429 Nürnberg

174084159W-01  
PTDE03

 Bausch & Lomb Incorporated,  
1400 N. Goodman St.  
Rochester, NY 14609, U.S.A.

 Bausch & Lomb Incorporated  
Cork Road Industrial Estate  
Waterford, X91 V383, Ireland

Hergestellt in Italien