

Regard®

Innovative
contact lens solution

DE

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für REGARD®, eine wissenschaftliche Innovation bei der Pflege weicher Kontaktlinsen, die gleichermaßen für Komfort und Hygiene sorgt. REGARD enthält ein aktives Desinfektionsmittel (den sog. OxyChlorite®-Komplex), das sich in die natürlichen Bestandteile (Salz und Wasser) des Tränenfilms verwandelt und dabei Sauerstoff freisetzt. Durch die Umwandlung gelangen keine schädlichen Konservierungsstoffe an das Auge, wie PHMB ist.

Mit REGARD werden Kontaktlinsen gereinigt, abgespült, desinfiziert und benetzt; außerdem werden Proteine, die sich auf der Oberfläche bilden, entfernt.

REGARD ist eine sterile, isotonische, gepufferte Lösung die Wasser, Natriumchlorid, Boratpuffer, Hydroxypropylmethylcellulose (0,15%), Poloxamer, OxyChlorite® enthält.

Gebrauchsanweisung

- Vor Handhabung der Linsen stets Hände gründlich waschen.
- Erste Kontaktlinse aus dem Auge nehmen, in die Hand legen, einige Tropfen REGARD auf die Linse geben und vorsichtig reinigen.
- Gründlich mit REGARD abspülen; kein Leitungswasser verwenden.
- Nur den original REGARD Linsenbehälter benutzen. Entfernen Sie den Deckel der Behälterkammer in der Sie die entsprechende Linse lagern möchten (Deckel mit dem Herz für die linke Linse). Füllen die Kammer bis zur Kante mit REGARD Lösung.
- Lagern Sie die Linse in der Kammer so, dass die äußere Kurve der Linse zum Kammerboden zeigt. Achten Sie darauf, dass die Linse so platziert wird, dass sie beim Schließen des Behälters nicht beschädigt wird.
- Linse in den Behälter geben. Mit der zweiten Linse ebenso verfahren und zur Deckeldesinfektion kurz den geschlossenen Behälter umdrehen.
- Kontaktlinsen mindestens sechs Stunden oder über Nacht einlagern. REGARD beseitigt schädigende Mikroorganismen und die von ihnen produzierten Enzyme und Toxine. Im verschlossenen Behälter können die Linsen bis zu drei Tage aufbewahrt werden. Danach erneut desinfizieren.
- Zum Aufsetzen der Linsen einige Tropfen REGARD auf die Innenkurve geben.
- Behälter ausleeren, mit REGARD ausspülen und geöffnet an der Luft trocknen lassen.

Vorsichtsmaßnahmen

Flasche: Nicht verwenden wenn die Flasche beschädigt ist oder das Siegel beschädigt.

Einzeldosis: Nicht verwenden, wenn die Einzeldosis vorher geöffnet worden ist oder beschädigt aussieht.

REGARD nur einmal verwenden.

Flasche: Nach jedem Gebrauch Lösung wegschütten. Tropferspitze nicht berühren und Flasche nach Gebrauch sorgfältig verschließen.

Einzeldosis: Nicht die Spitze der Einzeldosis berühren.

Vor Sonnenlicht schützen.

Nach Ablauf des Verfalldatums Lösung nicht mehr verwenden.

Flasche: Nach dem Öffnen 90 Tage haltbar; Lösung danach wegschütten.

Einzeldosis: Die Einzeldosis nach dem Öffnen nicht wiederverwenden.

Immer den frischen bei REGARD mitgelieferten Linsenbehälter benutzen.

Wenn Sie den Linsenbehälter nicht mehr reinigen können oder er deformiert ist, ersetzen Sie ihn gegen einen neuen.

Bei Augenirritationen Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht einnehmen.